



User Manual

## Kalibrace

Kalibrace alkohol testerů BACtrack provádí společnost:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, Praha 9 190 00

Kalibraci je možné domluvit na webu dovozce, případně níže na uvedených kontaktech:

[www.bactrack.cz](http://www.bactrack.cz) / [www.bactrack.sk](http://www.bactrack.sk)

[objednavky@sunnysoft.cz](mailto:objednavky@sunnysoft.cz)

+420 222 998 222

+420 603 561 155

*\*Kalibraci doporučujeme provádět alespoň jednou za půl roku.*

**\*\*Výrobce, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za jednání a skutky osob, které požíly alkohol. Použití alkoholtesteru je nikterak nezbujuje odpovědnosti za dodržování zákonů příslušné země.**

## Účinky alkoholu

BAC	
0,02-0,03%	Mírná euforie, ztráta plachosti. Tlumivé účinky nejsou patrné.*
0,04-0,06%	Pocit pohody, relaxace, nižší zábrany a pocit tepla. Euforie. Zhoršené uvažování a paměť. Snížení opatrnosti. Snížená úroveň řídičských schopností.
0,07-0,09%	Mírné zhoršení bilance, řeči, zraku, vnímání času a sluchu. Euforie. Snížení úsudku a sebeovládání. Pozornost rozum a paměť jsou oslabeny. Snížená úroveň řídičských schopností.

BAC	
0,10-0,12%	Výrazně snížená motorická koordinace a ztráta dobrého úsudku. Řeč může být nezřetelná. Narušená rovnováha, vidění a vnímají času a sluchu. Euforie.
0,13-0,15%	Vysoce snížená schopnost fyzické kontroly. Rozmazané vidění a ztráta rovnováhy. Snížená euforie a začíná se objevovat dysforie (úzkost, neklid).
0,16-0,20%	Převládá dysforie a objevuje se nevolnost.
0,25%	Potřeba pomoci při chůzi. Celková zmatenost. Dysforie s nevolností.
0,30%	Ztráta vědomí.
0,40% a více	Kóma, pravděpodobnost smrti v důsledku zástavy dechu.**

\*Důsledky intoxikace alkoholem jsou do značné míry individuální.


\*\*U některých jedinců může smrt nastat již při nižší hodnotě BAC

## PŘÍPRAVA

### Instalace baterie

Vložte jednu alkalickou AAA baterii.

## SCHÉMA

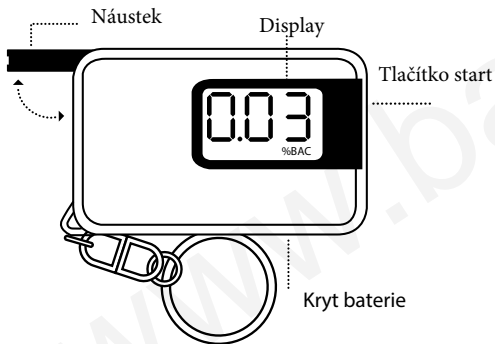

## MĚŘENÍ


### DŮLEŽITÉ



Před provedením testů je nutné dodržet odstup 20 minut od jídla, pití a kouření. Nedodržením odstavu můžete poškodit čidlo.




**KROK 1 (volitelné):** Připevněte ochranný náustek

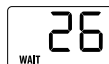

**KROK 2:** Stiskněte tlačítko START, BACtrack začne odpočítávat.



**KROK 3:** Když se odpočítávání blíží číslu 2, zhluboka se nadechněte.

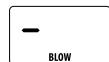

**KROK 4:** Jakmile odpočítávání dosáhne nuly, BACtrack začne pípat. Začněte foukat do náustku po dobu 5 sekund (dokud nepřestane pípání).




**KROK 5:** Senzor analyzuje vzorek dechu a zobrazí se odhadovaná hodnota BAC.

**POZNÁMKA: pro nepřesnější výsledky, vyčkejte minutu mezi zkouškami. Při testování vysoké hladiny, vyčkejte 3-5 minut mezi testy.**


### Chybová hlášení

Na displeji se zobrazí "FL":

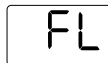

- Uživatel nezačal foukat po zahřívací době.
- Uživatel nefoukal 5 sekund v kuse
- Uživatel nedodržel odstup 20 minut

Na displeji se zobrazí "H":

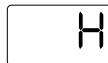

Hladina přesáhla horní hranici 0,40% BAC. Ověřte dodržení odstupu 20 minut.

Na displeji se zobrazí "Err":



Senzor je poškozen, kontaktujte podporu.

**Ikona nízkého stavu baterie:**



Vyměňte AAA baterii v testeru

## ČIŠTĚNÍ SENZORU

Při prvním použití či při použití testeru po delším časovém období (3 a více týdnů) může být povrch senzoru znečištěn. Pro maximální přesnost měření je potřeba vyčistit senzor a to 2 testy. Po provedení dvou kompletních testů je tester připraven k použití.

## UPOZORNĚNÍ

1. Dodržujte odstup nejméně 20 minut po pití, jídle nebo kouření před testováním. Nedodržení může způsobit nepřesnost měření a poškození senzoru.
2. Do BACtracku nefoukejte kouř, jídlo ani tekutiny, může dojít k poškození senzoru.
3. Netestujte v silném větru nebo v zakouřených prostorách.
4. Pravidelně si nechte svůj tester kalibrovat.
5. Tester je určen pro použití při teplotě 10-40°C.
6. Netestujte v přítomnosti jiných látek, které obsahují metylalkohol, isopropyl alkohol nebo aceton.
7. **Výrobce, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za jednání a skutky osob, které požíly alkohol. Použití alkoholtesteru je nikterak nezbavuje odpovědnosti za dodržování zákonů příslušné země.**