

BACTRACK®

breath alcohol detector

TESTS BREATH FOR THE PRESENCE OF ALCOHOL



OWNER'S
MANUAL

Kalibrace

Kalibrace alkohol testerů BACtrack provádí společnost:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, Praha 9 190 00

Kalibraci je možné domluvit na webu dovozce, případně níže na uvedených kontaktech:

www.bactrack.cz / www.bactrack.sk

objednavky@sunnysoft.cz

+420 222 998 222

+420 603 561 155

**Kalibraci doporučujeme provádět alespoň jednou za půl roku.*

****Výrobce, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za jednání a skutky osob, které požíly alkohol. Použití alkoholtesteru je nikterak nezbavuje odpovědnosti za dodržování zákonů příslušné země.**

Účinky alkoholu

BAC	
0,02-0,03%	Mírná euforie, ztráta plachosti. Tlumivé účinky nejsou patrné.*
0,04-0,06%	Pocit pohody, relaxace, nižší zábrany a pocit tepla. Euforie. Zhoršené uvažování a paměť. Snížení opatrnosti. Snížená úroveň řídičských schopností.
0,07-0,09%	Mírné zhoršení bilance, řeči, zraku, vnímání času a sluchu. Euforie. Snížení úsudku a sebeovládání. Pozornost rozum a paměť jsou oslabeny. Snížená úroveň řídičských schopností.

BAC	
0,10-0,12%	Výrazně snížená motorická koordinace a ztráta dobrého úsudku. Řeč může být nezřetelná. Narušená rovnováha, vidění a vnímají času a sluchu. Euforie.
0,13-0,15%	Vysoce snížená schopnost fyzické kontroly. Rozmazané vidění a ztráta rovnováhy. Snížená euforie a začíná se objevovat dysforie (úzkost, neklid).
0,16-0,20%	Převládá dysforie a objevuje se nevolnost.
0,25%	Potřeba pomoci při chůzi. Celková zmatenost. Dysforie s nevolností.
0,30%	Ztráta vědomí.
0,40% a více	Kóma, pravděpodobnost smrti v důsledku zástavy dechu.**

*Důsledky intoxikace alkoholem jsou do značné míry individuální.


**U některých jedinců může smrt nastat již při nižší hodnotě BAC

PŘÍPRAVA

Instalace baterie

Vložte jednu alkalickou AAA baterii.

SCHÉMA

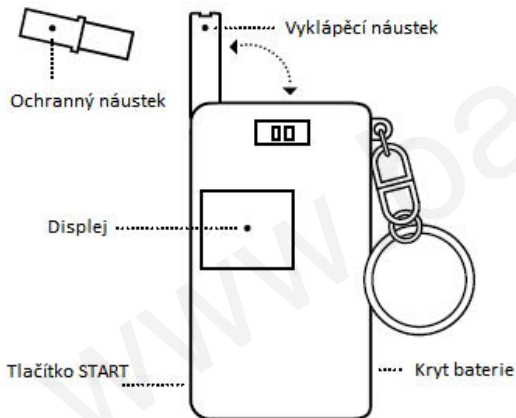

MĚŘENÍ

DŮLEŽITÉ



Před provedením testů je nutné dodržet odstup 20 minut od jídla, pití a kouření. Nedodržením odstupu můžete poškodit čidlo.




KROK 1 (volitelné): Připevněte ochranný náustek



KROK 2: Stiskněte tlačítko START, BACtrack začne odpočítávat.



KROK 3: Když se odpočítávání blíží číslu 2, zhluboka se nadechněte.

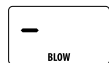

KROK 4: Jakmile odpočítávání dosáhne nuly, BACtrack začne pípát. Začněte foukat do náustku po dobu 5 sekund (dokud nepřestane pípání).



KROK 5: Senzor analyzuje vzorek dechu a zobrazí se odhadovaná hodnota BAC.


POZNÁMKA: pro nejpřesnější výsledky, vyčkejte minutu mezi zkouškami. Při testování vysoké hladiny, vyčkejte 3-5 minut mezi testy.

Chybová hlášení

Na displeji se zobrazí "FL":



- Uživatel nezačal foukat po zahřívací době.
- Uživatel nefoukal 5 sekund v kuse
- Uživatel nedodržel odstup 20 minut

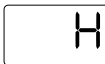

Na displeji se zobrazí "H":

Hladina přesáhla horní hranici 0,40% BAC. Ověřte dodržení odstupu 20 minut.



Na displeji se zobrazí "Err":

Senzor je poškozen, kontaktujte podporu.



Ikona nízkého stavu baterie:

Vyměňte AAA baterii v testeru.

ČIŠTĚNÍ SENZORU

Při prvním použití či při použití testeru po delším časovém období (3 a více týdnů) může být povrch senzoru znečištěn. Pro maximální přesnost měření je potřeba vyčistit senzor a to 2 testy. Po provedení dvou kompletních testů je tester připraven k použití.

UPOZORNĚNÍ

1. Dodržujte odstup nejméně 20 minut po pití, jídle nebo kouření před testováním. Nedodržení může způsobit nepřesnost měření a poškození senzoru.
2. Do BACtracku nefoukejte kouř, jídlo ani tekutiny, může dojít k poškození senzoru.
3. Netestujte v silném větru nebo v zakouřených prostorách.
4. Pravidelně si nechte svůj tester kalibrovat.
5. Tester je určen pro použití při teplotě 10-40°C.
6. Netestujte v přítomnosti jiných látek, které obsahují metylalkohol, isopropyl alkohol nebo aceton.
7. **Výrobce, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za jednání a skutky osob, které požily alkohol. Použití alkoholtesteru je nikterak nezbavuje odpovědnosti za dodržování zákonů příslušné země.**